

نحوه استفاده از بارکد خوان مینی وایداس

*دستگاه در ران کاری نباشد و سپس

از منوی اصلی منوی **UTILIUTY** را انتخاب کنید سپس گزینه **ASSAY UPDATE** سپس دکمه **YES** را بزنید.

بارکد خوان را در فاصله 7سانتی متری بارکد قرار دهید بصورت کاملاً عمود رو به پایین از یک سانتی متر قبل از مربع مشکی رنگ تا یک سانتی متر بعد از مربع نور را از بالا به پایین بکشید در صورت عدم مشاهده پیام **PLEASE WAIT** روی صفحه دستگاه همین کار را بدون قطع کردن نور از پایین به بالا مجدداً تا ظهور پیام روی صفحه ادامه دهید.

پس از مشاهده پیام **PLEASE WAIT** پس از چند ثانیه دکمه روبروی گزینه **CONFIRM** را انتخاب کنید.

پس از آن دستگاه شروع به پرینت گزارش **UPDATE** کیت می نماید. **MLE CARD** کیت مورد نظر را با منوی اول **SCAN MASTER** بخوانید و سپس استاندارد و کنترل سرم ها را